

Upute za uporabu

HRVATSKI (HR)

Praćenje ciklusa

Upute za uporabu



Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014

www.apple.com



Apple Distribution International
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Ireland

Kontakt: medicalcompliance@group.apple.com



SPECIFIČNE INFORMACIJE ZA ŠVICARSKU:

CH-REP:

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Switzerland

NAMIJENJENA UPORABA (EU PODRUČJE)

Praćenje ciklusa softverska je aplikacija namijenjena praćenju i prognozi menstrualnog zdravlja i informiranju osoba o njemu. Aplikacija Praćenje ciklusa analizira korisničke unose uključujući uobičajeno trajanje ciklusa, uobičajeno trajanje mjesečnice, količinu menstrualnog krvarenja i rezultate testa ovulacije, zajedno s agregiranim informacijama o pulsu tijekom mirovanja iz HealthKita. Osobe također mogu ručno zabilježiti sljedeće informacije za referencu, ali ti unosi ne utječu na prognoze: lagano krvarenje (krvarenje između mjesečnica), simptome, rezultate testa progesterona, rezultate testa za trudnoću, kvalitetu cervikalne sluzi, bazalnu temperaturu i seksualnu aktivnost. Ulazni korisnički podaci mogu se ručno unijeti ili importirati iz aplikacija drugih proizvođača. Prikazane prognoze namijenjene su samo za informativnu uporabu.

KONTRAINDIKACIJE

Aplikacija Praćenje ciklusa nije namijenjena za kontracepcijsku uporabu niti je namijenjena liječenju, tretiranju ili sprječavanju bilo koje bolesti.

UPORABA APLIKACIJE PRAĆENJE CIKLUSA

Podešavanje/početak uporabe

- Za dostupnost po regijama i kompatibilnost uređaja za Praćenje ciklusa posjetite <https://support.apple.com/hr-hr/HT210407>
- Ažurirajte Apple Watch i iPhone na najnoviji OS.
- Na iPhoneu otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Navigirajte do "Praćenje ciklusa".
- Dodirnite "Početak" i slijedite upute na zaslonu.
- U bilo kojem trenutku možete zatvoriti podešavanje tako da dodirnete "Poništi".
- Nakon što se podešavanje dovrši, možete početi pratiti svoj ciklus.

Kako pratiti ciklus

- Na iPhoneu otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Dodirnite Praćenje ciklusa.
- Povucite na točan datum, zatim dodirnite oval kako biste zabilježili mjesečnicu.
- Za dodavanje više informacija pomaknite se prema dolje i dodirnite kategoriju, unesite promjenu, a zatim dodirnite Gotovo. Možete pratiti simptome, lagano krvarenje, bazalnu temperaturu i ostalo.

Za praćenje ciklusa na Apple Watchu otvorite Praćenje ciklusa, povucite na točan datum, zatim dodirnite oval kako biste zabilježili mjesečnicu.

Provjera datuma sljedeće i posljednje mjesečnice

- Na iPhoneu otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Dodirnite Praćenje ciklusa.
- Listajte do Prognoze kako biste vidjeli datum vjerojatnog početka sljedeće mjesečnice. Ako ne vidite procjenu, dodirnite Prikaži sve pored Prognoze.

- Listajte do Sažetka kako biste vidjeli datum početka posljednje mjesečnice i uobičajeno trajanje ciklusa.

Za provjeru datuma na Apple Watchu otvorite Praćenje ciklusa, zatim listajte prema dolje do Prognoziranje mjesečnice ili Posljednja mjesečnica.

Podešavanje obavijesti za praćenje mjesečnice i plodnih dana

- Na iPhoneu otvorite aplikaciju Zdravlje i dodirnite karticu Pregled.
- Dodirnite Praćenje ciklusa.
- Listajte prema dolje i dodirnite Opcije.
- Odaberite Prognoziranje mjesečnice i Obavijesti o mjesečnici. Ove obavijesti mogu vas informirati o vjerojatnom početku mjesečnice i pitati vas je li vam mjesečnica završila.
- Odaberite Prognoziranje plodnih dana i Obavijesti o plodnosti. Ove obavijesti mogu vas informirati o vjerojatnom početku plodnih dana ili jesu li prognoze ažurirane na temelju novih informacija.

Prognoze će započeti nakon što unesete najmanje dvije mjesečnice u Praćenje ciklusa i temeljit će se na zabilježenim podacima. Ako zabilježite mjesečnicu prije njenog predviđenog početka, nećete primiti prognozu mjesečnice za taj ciklus. Obavijesti se prikazuju na vašem Apple Watchu i iPhoneu.

Brisanje Praćenja ciklusa na Apple Watchu

Praćenje ciklusa možete ukloniti izravno s početnog zaslona Apple Watcha:

- Idite na početni zaslon Apple Watch uređaja.
- Ako ste u prikazu rešetke, lagano dodirnite i zadržite aplikaciju Praćenje ciklusa da počne podrhtavati.
- Dodirnite aplikaciju, zatim dodirnite ikonu "x".
- Ako ste u prikazu popisa, povucite ulijevo po aplikaciji Praćenje ciklusa i dodirnite ikonu kante za smeće.
- Dodirnite Obriši.
- Pritisnite Digital Crown za dovršetak.

SIGURNOST I PERFORMANSE

Mogućnost prognoziranja početka nadolazeće mjesečnice i plodnih dana za aplikaciju Praćenje ciklusa ispitana je u studiji od 210 ispitanika. Oslanja se na algoritam za duboko učenje koji se temelji na pulsu (kad su dostupni podaci o pulsu) za pružanje prognoza početka mjesečnice i plodnih dana. Aplikacija Praćenje ciklusa točno najavljuje početak mjesečnice unutar prikazanih prognoza u 80 % slučajeva. Na razini populacije: 83,4 % prognoziranih plodnih dana imat će barem jedan plodni dan (definiran kao unutar 5 dana prije ovulacije ili na dan ovulacije).

U SLUČAJU PROBLEMA

Ako naiđete na poteškoće tijekom uporabe aplikacije Praćenje ciklusa, pokušajte ih ispraviti na niže opisan način.

Problem: Osoba ne prima prognoze početka mjesečnice.

Rješenje: Za značajku praćenja ciklusa potrebno je zabilježiti barem dvije mjesečnice kako bi se pružilo dovoljno podataka za prognoziranje početka mjesečnice. Provjerite je li za čimbenike trudnoće zabilježen datum završetka.

Problem: Osoba ne prima prognoze plodnih dana.

Rješenje: Za značajku praćenja ciklusa potrebno je zabilježiti barem dvije mjesečnice kako bi se pružilo dovoljno podataka za prognoziranje plodnih dana. Pregledajte korisničke postavke. Provjerite je li za čimbenike trudnoće i kontracepcije zabilježen datum završetka.

MJERE OPREZA

NEMOJTE koristiti aplikaciju Praćenje ciklusa za pospješivanje začeća.

NEMOJTE koristiti prognoze plodnih dana kao oblik kontracepcije.

NEMOJTE koristiti podatke aplikacija Zdravlje i Praćenje ciklusa za dijagnosticiranje bolesti.

Aplikacije drugih proizvođača koje rade s aplikacijom Zdravlje također se mogu koristiti s aplikacijom Praćenje ciklusa.

Ako smatrate da vaše stanje zahtijeva hitnu medicinsku pažnju, nazovite hitnu službu.

Korisnik ne bi trebao tumačiti izlazne podatke aplikacije ili poduzimati kliničke postupke na temelju njih bez konzultiranja s kvalificiranim zdravstvenim djelatnikom.

Ovo je obavijest za korisnika i/ili pacijenta da se bilo koja ozbiljna nezgoda do koje je došlo uslijed uporabe uređaja treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice korisnika i/ili pacijenta.

OPREZ: Trebali biste se obratiti svojem liječniku ako iskusite bilo kakve promjene svog zdravstvenog stanja.

SIGURNOST: Apple preporučuje da zbog sigurnosnih razloga podesite šifru (osobni identifikacijski broj [PIN]), Face ID ili Touch ID (otisak prsta) na svom iPhoneu i šifru (osobni identifikacijski broj [PIN]) na svom Apple Watchu. Zaštita iPhonea bitna je jer ćete na njega spremati osobne podatke o zdravlju. Korisnici će također primati dodatne obavijesti o ažuriranju iOS i watchOS sustava na uređaju, a ažuriranja će se isporučivati bežično, čime se pospješuje trenutna primjena najnovijih sigurnosnih ispravaka. Pogledajte "Sigurnosne upute za iOS i watchOS" u kojima se opisuju Appleove sigurnosne prakse, a dostupan je svim našim korisnicima. Za Sigurnosne upute za iOS i watchOS posjetite <https://support.apple.com/hr-hr/guide/security/welcome/web>.

SIMBOLI NA OPREMI



Proizvođač



Pogledajte Upute za uporabu



Ovlašteni predstavnik za Europu



Medicinski proizvod

099-31002 Revizija D, travanj 2022.
